



medi

# circaid® – das Original in der adaptiven Kompression

Effektiv versorgen, ganzheitlich profitieren

Mit Hilfsmittelnummer

medi. ich fühl mich besser.

# circaid® medizinische adaptive Kompressionssysteme (MAK)

**Die von der S2k-Leitlinie „Medizinische Kompressionstherapie“ empfohlene Alternative zum herkömmlichen Wickelverband in der Entstauungstherapie<sup>1</sup>**

Medizinische adaptive Kompressionssysteme (MAK) sind Kompressionsversorgungen, die mithilfe von Bändern und Klettverschlüssen angelegt werden. Dadurch lässt sich der individuelle Kompressionsdruck exakt einstellen.

Die S2k-Leitlinie „Medizinische Kompressionstherapie“ empfiehlt MAK als Alternative zum herkömmlichen Wickelverband. Aufgrund ihrer kurzzügigen Eigenschaften und der hohen Wandstabilität werden die medizinischen adaptiven Kompressionssysteme für die Entstauungstherapie bei Lymphödemen und ausgeprägten venösen Ödemen sowie bei der Behandlung des Ulcus cruris venosum eingesetzt.

Mit dem Klettmechanismus können sowohl Fachkräfte als auch Patienten die MAK nach Einweisung durch Fachpersonal einfach an- und ablegen. Durch die einzelnen, ineinandergreifenden Bänder und mit der beiliegenden Messkarte lässt sich der Kompressionsdruck kontrolliert einstellen und jederzeit nachjustieren – für eine individuelle und effektive Entstauungstherapie.



# circaid® Produkt-Eigenschaften



Built-In-Pressure®

## Built-In-Pressure® System

- Zur Einstellung, Kontrolle und Nachjustierbarkeit des korrekten therapeutischen Drucks



Breathe-O-Prene

## Breathe-O-Prene

- Atmungsaktives Material
- Geruchshemmender Effekt



Juxtaposed band

## Juxtaposed Band-System

- Optimaler Sitz durch ineinandergreifende Bänder
- Bänder einzeln nachjustierbar



Variety

## Vielfalt

- Großes Sortiment an Versorgungsoptionen
- Umfangreiches Größenangebot



Easy handling

## Einfache Handhabung

- Leichtes An- und Ablegen nach Einweisung durch Fachpersonal



Inelastic

## Unelastisch


- Unelastisches Material für eine effektive Therapie und hohen Tragekomfort
- Von der Natur inspiriert



Für Waschmaschinen  
und Trockner geeignet





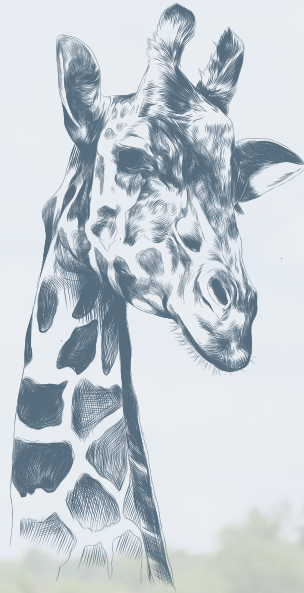

## Von der Natur inspiriert.

circaid Produkte haben ein tierisches Vorbild: die Giraffe – aufgrund ihrer besonderen Haut. Giraffen besitzen in den Vorder- und Hinterläufen einen Venendruck von über 250 mmHg – dreimal höher als beim Menschen. Obwohl die Tiere rund um die Uhr auf den Beinen sind, und teilweise auch im Stehen schlafen, haben sie jedoch keine Lymphödeme oder Venenerkrankungen. Warum? Im Gegensatz zu uns Menschen, haben Giraffen eine unelastische Haut, die sich nicht ausdehnt.\* Somit tragen Giraffen dauerhaft natürliche Kompression. Der Gründer von circaid ließ sich davon inspirieren und entwickelte die erste patentierte, unelastische Beinversorgung. Diese wurde zu den heutigen circaid Produkten (Kurzform für „circulation aid“ = Kreislaufunterstützung) weiterentwickelt.

\* Sathar F, Ludo Badlangana N, Manger PR. Variations in the thickness and composition of the skin of the giraffe. Anatomical record 2010;293(9):1615-1627.

# Effektiv versorgen, ganzheitlich profitieren

## 1 Entstauung

### circaid® medizinische adaptive Kompressionssysteme in der Entstauungsphase

Kompression ist ein Grundbaustein der leitliniengerechten<sup>1</sup> Therapie bei lymphologischen und phlebologischen Indikationen. circaid medizinische adaptive Kompressionssysteme (MAK) sind die Alternative zum herkömmlichen Wickelverband. Sie kommen bei der Entstauung von Lymphödemen, ausgeprägten venösen Ödemen und in der Therapie des Ulcus cruris venosum zum Einsatz. Mit circaid MAK bietet medi eine effektive Option, um das Ödem in der initialen Behandlung zu entstauen.

#### Effektive Entstauung – einstellen, kontrollieren, nachjustieren

Die erste Phase der Therapie, die Entstauungsphase, hat zum Ziel, angestaute Flüssigkeit im Gewebe zu verringern. In dieser volumeninstabilen Phase kommt es zu deutlichen Umfangsschwankungen. Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Therapie ist ein Hilfsmittel, das definierte und konsequente

Kompression ermöglicht, auch bei sich schnell reduzierenden Umfängen:

- Medizinische adaptive Kompressionssysteme (MAK) sind jederzeit anpassbar und sorgen so für eine kontinuierliche Kompression.
- Nach Einweisung durch Fachpersonal ermöglicht die einfache Handhabung dem Patienten Selbstmanagement und erleichtert die Hygiene.
- Durch das integrierte Built-In-Pressure System (BPS) lässt sich der individuelle Kompressionsdruck exakt einstellen, kontrollieren und nachjustieren – auch vom Patienten selbst.



## Erhaltung des Therapieerfolgs und Rezidivprophylaxe mit mediven® Kompressionsstrümpfen

Ist ein Lymphödem oder ausgeprägtes venöses Ödem entstaat beziehungsweise ist das offene Bein abgeheilt, besteht die Grunderkrankung dennoch fort. Es ist deshalb essenziell, die zugrunde liegende chronisch venöse Insuffizienz (CVI) oder das Lymphödem weiter zu therapieren.

### Effektive Erhaltung – optimal versorgt mit mediven® Kompressionsstrümpfen

Bei der Auswahl der Kompressionstherapie ist neben der Indikation auch die individuelle Ödemneigung und Konstitution des Patienten zu berücksichtigen: Je nach Situation kann ein rund- oder flachgestrickter Kompressionsstrumpf beziehungsweise ein Ulkus-Strumpfsystem im Anschluss an die Entstauung verordnet werden.

### In wenigen Schritten zur patientenindividuellen Versorgung

#### mediven® Rundstrick – individuelle Patientenversorgung



Achtung: Entscheidend für die Material-Auswahl ist jeweils das Kriterium mit der schwersten Ausprägung!

#### mediven® Flachstrick – Versorgungskompass

	Material	Leicht z. B. mediven® mango®	Mittel z. B. mediven® copy	Stark z. B. mediven® 550 Bein
Kriterien				
Bindegewebe		normal bis fest	weich bis fest	sehr weich bis verhärtet
Gewicht		↑	↑	↑
Vertiefte Hautfalten / Kalbersprünge		keine	moderat	stark
Schweregrad der Erkrankung		mediven® mango®	mediven® copy	mediven® 550 leg
Empfohlener mediven Kompressionsstrumpf				

\*Wandstabilität

Weitere Informationen finden Sie in unserem Phleboguide (Art.-Nr. 0020539) und Lymphguide (Art.-Nr. 0025134)



- ✓ Verlässlich
- ✓ Reproduzierbar
- ✓ Durchdacht



# Vertrauen Sie dem Original – definiert einstellbarer Druck seit über einem Jahrzehnt

Mithilfe des einzigartigen, integrierten Built-In-Pressure Systems (BPS) lässt sich der individuelle Kompressionsdruck exakt einstellen, kontrollieren und jederzeit nachjustieren.


- Einstellbar auf den verordneten Kompressionsdruck
- Kontrolle und Sicherstellen des richtigen Kompressionsdrucks
- Integrierter, graduierter Kompressionsverlauf – nach Einstellen der einzelnen Bänder auf denselben Kompressionsbereich sorgt das Produkt-Design für einen abfallenden Kompressionsdruck von distal nach proximal
- Kompressionsdruck jederzeit nachjustierbar – Aufrechterhalten des notwendigen Kompressionsdrucks im Laufe des Tages
- Einstellbar auf verschiedene Kompressionsbereiche

## Patientenindividuell einstellbare Kompressionsbereiche

Kompressionsklasse medizinischer Kompressionsstrumpf	CCL 1	CCL 2	CCL 3	CCL 4	
Druck in mmHg	18 – 21	23 – 32	34 – 46	> 49	
circaid Kompressionsbereiche in mmHg	10 – 20*	20 – 30	30 – 40	40 – 50**	50+***

\* nur circaid juxtafit essentials Arm  
 \*\* nur circaid juxtalite und juxtafit Beinversorgungen  
 \*\*\* nur circaid juxtafit Beinversorgungen

## Den Kompressionsdruck einfach einstellen

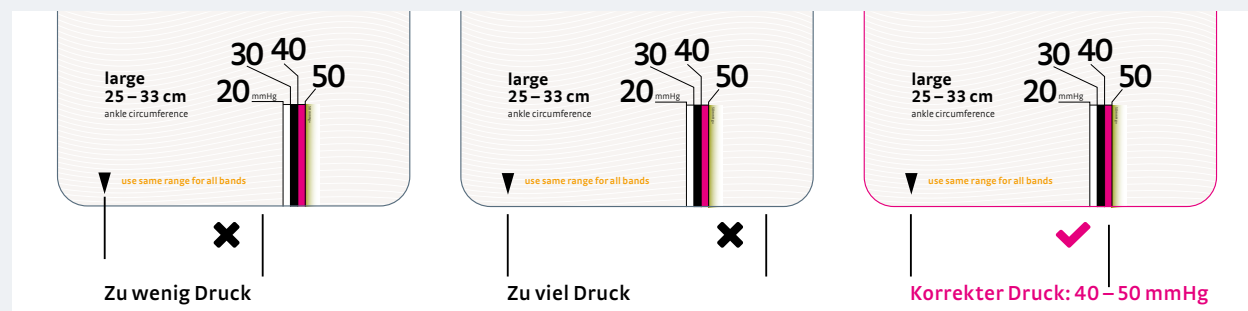

Mithilfe der BPS-Linien auf den einzelnen Bändern lässt sich der Kompressionsdruck exakt einstellen. Legen Sie das schwarze Dreieck ▼ der Druckmesskarte an eine der beiden BPS-Linien auf dem Klettband an. Die zweite Linie sollte auf den Kompressionsdruck zeigen, den der Arzt verordnet hat.

# Zwei starke Produkt-Linien – das ist der Unterschied

Die circaid Produkte kommen im Rahmen der Entstauungstherapie zum Einsatz. Für eine optimale und effektive Therapie gibt es zwei Produkt-Linien: für phlebologische sowie für lymphologische Indikationen.

circaid® juxtalite®

Zur Entstauung ausgeprägter venöser Ödeme und Therapie des Ulcus cruris venosum

- 2,5 mm dickes, unelastisches Breathe-O-Prene Material für hohe Wandstabilität und hohen Arbeitsdruck
- 4 Bänder – für gleichmäßige Druckverteilung und einfache Handhabung, gerade auch für ältere Patienten
- Anatomisches, nahtloses Design für gleichmäßige und individuelle Passform
- Als AD-Versorgung erhältlich – venöse Ödeme und Geschwüre treten überwiegend im Unterschenkelbereich auf<sup>2</sup>
- Zusätzliche Fußoption verfügbar – zur Kompression von ausgeprägten Vorfußödemen
- 5-eckige Druckmesskarte






## circaid® juxtafit® essentials

Zur Entstauung  
lymphologischer Ödeme


- 3,9 mm dickes, unelastisches Breathe-O-Prene Material im Bein für sehr hohe Wandstabilität und sehr hohen Arbeitsdruck
- 2,5 mm dickes, unelastisches Breathe-O-Prene Material für den Arm
- 6 bis 8 Bänder – für eine individuelle anatomische Passform bei von Lymphödem betroffenen Extremitäten
- Naht an der Wade für optimale, anatomische Passform
- Als Unterschenkel-, Oberschenkel mit Knie- und Armversorgung erhältlich
- Zusätzliche Fuß- und Handoption verfügbar – für Kompression von ausgeprägten Vorfuß- und Handödemen
- 4-eckige Druckmesskarte für das Bein, 3-eckige Druckmesskarte für den Arm

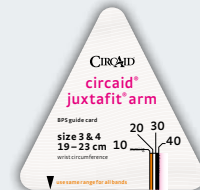

# circaid® juxtalite®

Zur Entstauung ausgeprägter venöser Ödeme und Therapie des Ulcus cruris venosum

Medizinisches adaptives Kompressionssystem für die initiale Entstauung von ausgeprägten venösen Ödemen und bei Ulcus cruris venosum – empfohlen von der S2k-Leitlinie „Medizinische Kompressionstherapie“<sup>1</sup>

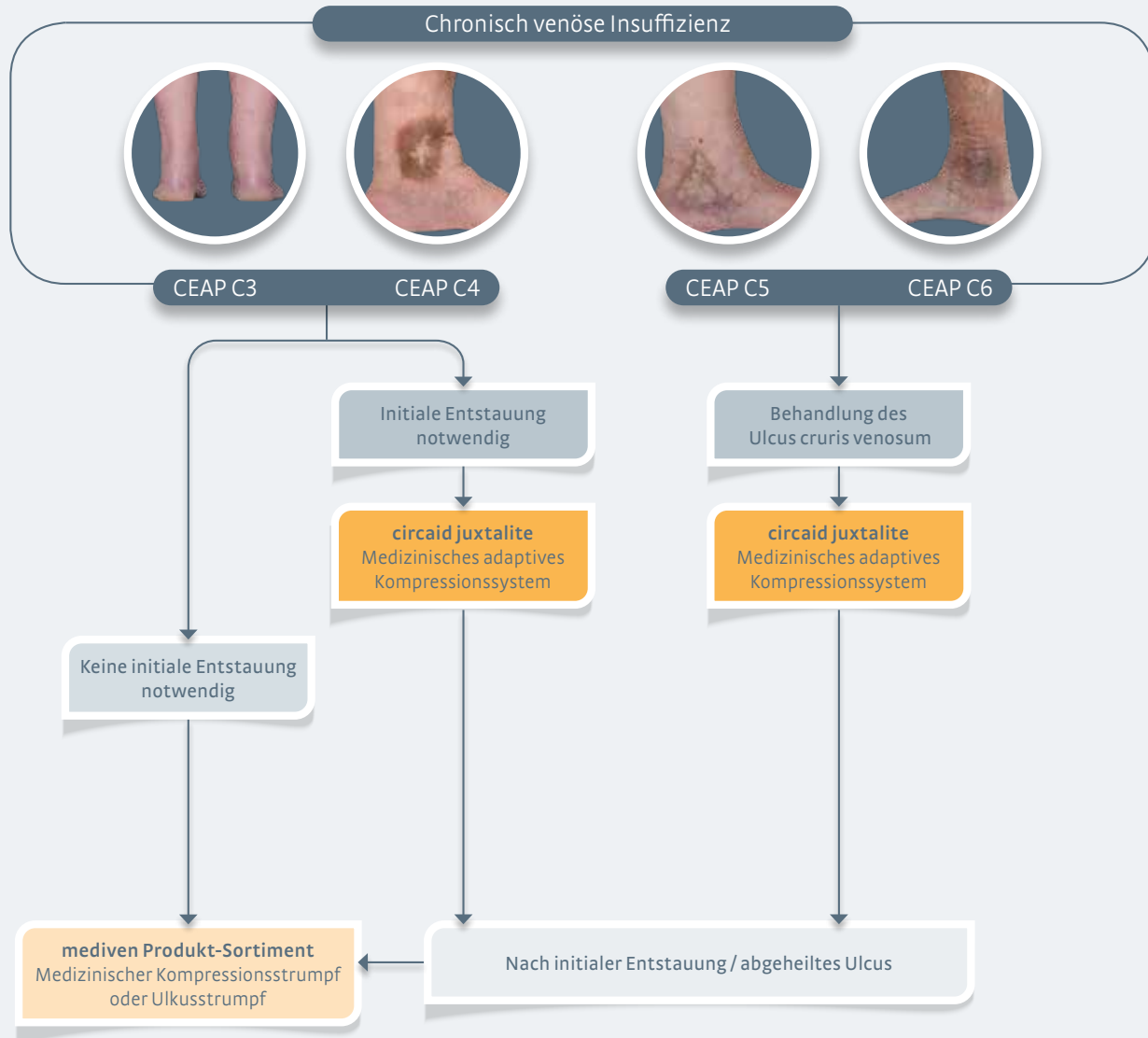

C3: Varikose mit Ödem; C4: Varikose mit trophischen Hautveränderungen; C5: Abgeheiltes Ulcus cruris venosum; C6: Florides Ulcus cruris venosum



- 1 circaid Built-In-Pressure System (BPS)**
- Mit handlicher Messkarte einstellbarer und kontrollierbarer Kompressionsdruck
  - Jederzeit nachjustierbar – für eine kontinuierliche Kompressionstherapie
  - Nach proximal graduiert abfallender Druckverlauf

- 2 Breathe-O-Prene**
- Unelastisches Material mit hoher Wandstabilität – für hohen Arbeitsdruck
  - Atmungsaktiv
  - Geruchshemmender Effekt

- 3 Einfache Handhabung**
- Nach Einweisung durch Fachpersonal einfaches An- und Ablegen der Versorgung – fördert Selbstmanagement
  - Weniger fehleranfällig in der Anlage als Kompressionsbandagierungen<sup>1</sup>

- 4 Juxtaposed Band-System**
- System aus einzelnen, ineinandergreifenden Bändern – für optimalen Sitz
  - Extrabreite Bänder vermeiden Fensterödeme
  - Nachjustieren der einzelnen Bänder verhindert einen Druckverlust der Versorgung – die Ödemrückbildung wird wirksam gefördert<sup>1</sup>

- 5 Kompressive Socke**
- Beugt Ödemen im Vorfuß vor
  - Fördert die Mobilität – Tragen normaler Schuhe möglich<sup>2</sup>
  - Zusätzliche Fußoption verfügbar

# circaid® juxtalite®

Zur Entstauung ausgeprägter  
venöser Ödeme und Therapie  
des Ulcus cruris venosum

Medizinisches adaptives Kompressionssystem für die initiale Entstauung von ausgeprägten venösen Ödemen und bei Ulcus cruris venosum.

## Aufgrund der Produkt-Eigenschaften empfehlen wir circaid juxtalite für:\*

- Frauen / Männer
- Initiale Entstauung von ausgeprägten venösen Ödemen
- Behandlung des Ulcus cruris venosum
- Bis zu 24-stündige Kompressionstherapie
- Mobile / immobile Patienten

## Eigenschaften

- Mit handlicher Messkarte zuverlässig einstellbarer und kontrollierbarer Kompressionsdruck
- Nachjustieren der Bänder während des Tragens erhält den Kompressionsdruck kontinuierlich aufrecht<sup>1</sup>
- Extrabreite Bänder vermeiden Fensterödeme
- 4 Bänder für einfache Handhabung, gerade auch bei älteren Patienten
- Produkt-Design gewährleistet nach proximal abfallenden Druckverlauf
- Zwei Stück Unterziehstrümpfe aus Baumwolle – hoher Tragekomfort und Aufrechterhaltung der Hygiene

## Nutzen für Ihre Kunden / Patienten

- Schnellere Wundheilung beim offenen Bein (Ulcus cruris venosum)<sup>3</sup>
- Eigenständiges und einfaches An- und Ablegen der Versorgung mit Klett – für mehr Selbstmanagement
- Erleichtert Hygiene und Hautpflege im Therapiealltag
- Fördert die Mobilität im Alltag<sup>4</sup>: mit normalen Schuhen kombinierbar dank Fußversorgung mit kompressiver Socke
- Geeignet für Waschmaschine und Trockner

Hilfsmittelnummer:  
17.06.23.2001

\*Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die Diagnose des Arztes, noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.  
Indikationen: siehe Gebrauchsanweisung circaid juxtalite



## Einstellbarer Kompressionsdruck

20 – 30 mmHg  
30 – 40 mmHg  
40 – 50 mmHg

## Farbe

Beige

## Hinweis

circaid juxtalite ist im Hilfsmittelverzeichnis für folgende Indikationen gelistet:

- Initiale Entstauung von ausgeprägten venösen Ödemen
- Behandlung des Ulcus cruris venosum

## Materialzusammensetzung


54 % Nylon  
39 % Polyurethan  
7 % Elasthan

## Videos

Mehr Informationen und Anlegevideos finden Sie unter:



# circaid® juxtalite®

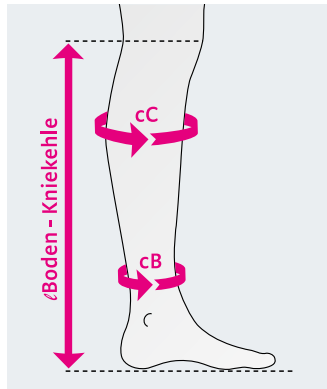

## Fußoption

Bei Bedarf kann eine zusätzliche Fußoption gesondert verordnet und bestellt werden.



## medi Tipp

Mit dem circaid juxtalite Maßband (Art.-Nr. 0097C78) einfach und schnell zur richtigen Produkt-Länge. Legen Sie hierfür die Markierung am Knöchel an und halten das Maßband an das Bein Ihres Kunden. Sie können direkt ablesen, welche Produkt-Länge notwendig ist.

## Umfangmaße in cm

	S	M	M - X*	L
cC	26 - 36	33 - 44	44 - 54	41 - 51
cB	19 - 22	22 - 27	22 - 27	25 - 32
	L - X*	XL	XL - X*	XXL
cC	51 - 61	37 - 48	48 - 61	53 - 64
cB	25 - 32	30 - 37	30 - 37	35 - 42

## Maße für die Längenbestimmung

	Kurz	Lang
∓Boden - Kniekehle	< 44	> 44

Größe / Art.-Nr.	Kurz	Lang
S	JU17702000	JU17002000
M	JU17703000	JU17003000
M - X*	JU17713000	JU17013000
L	JU17704000	JU17004000
L - X*	JU17714000	JU17014000
XL	JU17705000	JU17005000
XL - X*	JU17715000	JU17015000
XXL	JU17706000	JU17006000

\* - X = extraweite Wade

## Lieferumfang:

- 1 Stück medizinisches adaptives Kompressionssystem
- 1 Stück Druckmesskarte
- 2 Stück circaid kompressive Socken
- 2 Stück circaid Unterziehstrümpfe (Baumwolle, ohne Kompression)

## Hinweise

Sollten die Maße des Patienten nicht in die Werte der Maßtabelle fallen, ist eine Versorgung mit circaid juxtalite nicht möglich.

# circaid® juxtalite® Fußoption


Zur Entstauung ausgeprägter  
venöser Ödeme und Therapie  
des Ulcus cruris venosum

Die folgende Fußoption ist die perfekte Ergänzung zu circaid juxtalite.

## circaid® juxtalite® Fußteil

Zusätzliche Kompressionsversorgung mit geschlossener Ferse für  
venöse Erkrankungen.

- Kompression für Fuß und Sprunggelenk
- Für eine perfekte Passform Produkt in der Länge kürzbar
- Einfache Handhabung – ideal für Selbstmanagement
- Kann über der kompressiven Socke getragen werden

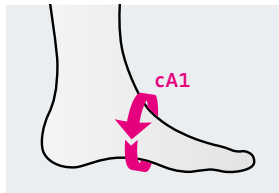

Umfang in cm	S	M
cA1	19 – 26	24 – 31
Art.-Nr.	JU1W002000	JU1W003000

Hilfsmittelnummer:  
17.06.23.3001

### Hinweis

Es wird empfohlen, eine circaid Fußoption immer in Kombination mit einer circaid Beinversorgung zu tragen.

Indikationen: siehe Gebrauchsanweisung circaid juxtalite Fußteil




### Materialzusammensetzung

55 % Nylon  
38 % Polyurethan  
7 % Elasthan

### Videos

Mehr Informationen, ein Anlegevideo  
sowie ein Video zur individuellen  
Anpassung finden Sie unter:

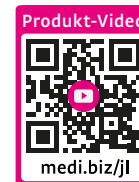



# Wichtige Hinweise zu Rezept und Abrechnung

**Rezeptbeispiel**

Krankenkasse bzw. Kostenträger:

Name, Vorname des Versicherten:  geb. am:

Kassen-Nr.:  Versicherten-Nr.:  Status:

Vertragsarzt-Nr.:  VK gültig bis:  Datum:

**Rp.** (Bitte Leerräume durchstreichen)

2 Ulcus cruris venosum

3 Medizinisches adaptives Kompressionssystem, circaid juxtalite Unterschenkel

4 1 Stück

5 30 – 40 mmHg

6 17.06.23.2001

Hilfsmittel-Nr.:  (7)

Vertragsarztsiegel:

- 1 Markieren Sie das Feld Nr. 7 mit der Ziffer „7“
- 2 Genaue Indikation / Diagnose (ICD-10-Code), individuelle Kontextfaktoren
- 3 Ggf. Produkt-Name (mit Begründung)
- 4 Anzahl der Versorgungen (1 Stück oder 2 Stück)
- 5 Erforderlicher Kompressionsdruck (z. B. 30 – 40 mmHg)
- 6 Hilfsmittelnummer

## medi Tipp

Begründen Sie die Erforderlichkeit der MAK auf dem Rezept, um Kostenträgern die Bearbeitung zu erleichtern – zum Beispiel:

- Bessere Anziehbarkeit bei hohem Schmerzempfinden bei Ulcus cruris venosum
- Wundaufgabe bleibt besser platziert

## circaid juxtalite ist im Hilfsmittelverzeichnis für folgende Indikationen gelistet:

- Initiale Entstauung von ausgeprägten venösen Ödemen
- Behandlung des Ulcus cruris venosum


## Hinweis

Wenn sich das Beschwerdebild des Patienten im Verlauf verbessert, zum Beispiel **Rezidivprophylaxe** bei Ulcus cruris venosum, ist es möglich die Versorgung zu wechseln und budgetneutral zum Beispiel einen medizinischen Kompressionsstrumpf oder Ulcusstrumpf zu verordnen.

# circaid® juxtafit® essentials

Zur Entstauung  
lymphologischer Ödeme

Medizinisches adaptives Kompressionssystem für die initiale Entstauung von Lymphödemen – empfohlen von der S2k-Leitlinie „Medizinische Kompressionstherapie“.<sup>1</sup>

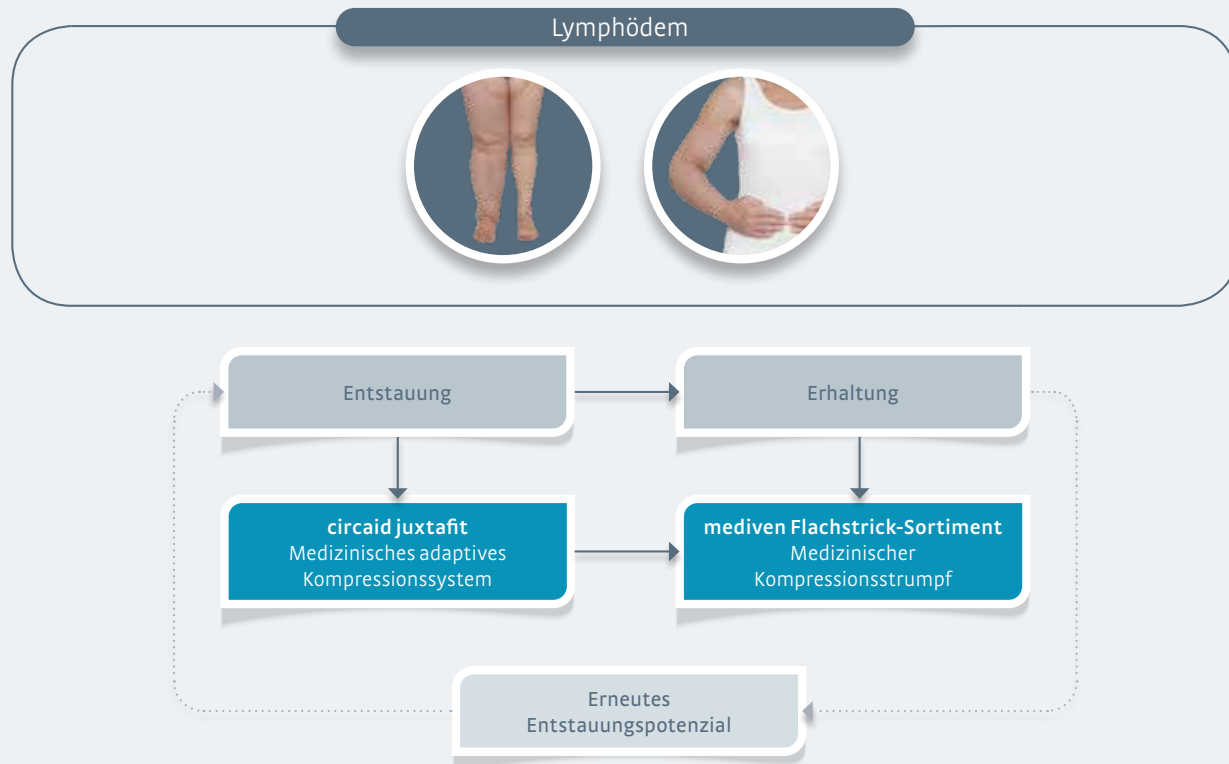



**1 circaid Built-In-Pressure System (BPS)**

- Mit handlicher Messkarte einstellbarer und kontrollierbarer Kompressionsdruck
- Jederzeit nachjustierbar – für eine kontinuierliche Kompressionstherapie
- Nach proximal graduiert abfallender Druckverlauf

**2 Breathe-O-Prene**

- Unelastisches Material mit hoher Wandstabilität – für hohen Arbeitsdruck
- Atmungsaktiv
- Geruchshemmender Effekt

**3 Einfache Handhabung**

- Nach Einweisung durch Fachpersonal einfaches An- und Ablegen der Versorgung – fördert Selbstmanagement
- Weniger fehleranfällig in der Anlage als Kompressionsbandagierungen<sup>1</sup>

**4 Juxtaposed Band-System**

- System aus einzelnen, ineinandergreifenden Bändern – für optimalen Sitz und Vermeidung von Fensterödemen
- Nachjustieren der einzelnen Bänder verhindert einen Druckverlust der Versorgung – die Ödemrückbildung wird wirksam gefördert<sup>1</sup>

**5 Kompressive Socke**

- Beugt Ödemen im Vorfuß vor
- Fördert die Mobilität – Tragen normaler Schuhe möglich<sup>2</sup>
- Zusätzliche Fußoption verfügbar

# circaid® juxtafit® essentials Bein

Zur Entstauung  
lymphologischer Ödeme

Medizinisches adaptives Kompressionssystem für die initiale Entstauung von Lymphödemen.

**Aufgrund der Produkt-Eigenschaften empfehlen wir circaid juxtafit essentials für:\***

- Männer / Frauen
- Initiale Entstauung von Lymphödemen
- Bis zu 24-stündige Kompressionstherapie
- Mobile / immobile Patienten

## Eigenschaften

- Mit handlicher Messkarte zuverlässig einstellbarer und kontrollierbarer Kompressionsdruck
- Nachjustieren der Bänder während des Tragens erhält den Kompressionsdruck kontinuierlich aufrecht<sup>1</sup>
- 6 – 8 Bänder für eine individuelle anatomische Passform bei von Lymphödem betroffenen Extremitäten
- Produkt-Design gewährleistet nach proximal abfallenden Druckverlauf
- Zwei Stück Unterziehstrümpfe aus Baumwolle – hoher Tragekomfort und Aufrechterhaltung der Hygiene

## Nutzen für Ihre Kunden / Patienten

- Signifikant schnellere Entstauung von Lymphödemen<sup>5</sup>
- Eigenständiges und einfaches An- und Ablegen der Versorgung mit Klett – für mehr Selbstmanagement
- Erleichtert Hygiene und Hautpflege im Therapiealltag
- Fördert die Mobilität im Alltag<sup>4</sup>: mit normalen Schuhen kombinierbar dank Fußversorgung mit kompressiver Socke
- Geeignet für Waschmaschine und Trockner

\* Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die Diagnose des Arztes, noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.  
Indikationen: siehe Gebrauchsanweisung circaid juxtafit essentials



## Einstellbarer Kompressionsdruck

20 – 30 mmHg  
30 – 40 mmHg  
40 – 50 mmHg  
50+ mmHg

## Farbe

Beige


## Hinweis

circaid juxtafit essentials Unterschenkel ist im Hilfsmittelverzeichnis für folgende Indikation gelistet:

- Initiale Entstauung von Lymphödemen

## Videos

Mehr Informationen und Anlegevideos finden Sie unter:

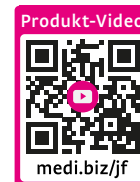

# circaid® juxtafit® essentials Unterschenkel

## Lieferumfang:

- 1 Stück medizinisches adaptives Kompressionssystem
- 1 Stück Druckmesskarte
- 2 Stück circaid kompressive Socken
- 1 Stück circaid pac band Fußteil
- 2 Stück circaid Unterziehstrümpfe Unterschenkel ohne Fuß (Baumwolle, ohne Kompression)
- 1 Stück circaid Überzug Schwarz

Hilfsmittelnummer:  
17.06.23.2002

# circaid® juxtafit® essentials Oberschenkel mit Knie

## Lieferumfang:

- 1 Stück medizinisches adaptives Kompressionssystem
- 1 Stück Universal-Druckmesskarte
- 1 Stück circaid Kniekappe
- 2 Stück circaid Unterziehstrümpfe ganzes Bein ohne Fuß (Baumwolle, ohne Kompression)
- 1 Stück circaid Überzug Schwarz
- 8 zusätzliche Klettverschlüsse für gekürzte Bänder

## Besonderheit des Oberschenkels

- Weiches Material in der Kniekehle – für mehr Tragekomfort
- Bänder kürzbar – für einfachere Handhabung und mehr Tragekomfort
- Versorgung am oberen Rand um 5 cm kürzbar – für optimalen Sitz

Hilfsmittelnummer:  
17.06.23.4001



## Materialzusammensetzung


53 % Polyurethan  
42 % Nylon  
5 % Elasthan



## Materialzusammensetzung

52 % Nylon  
40,9 % Polyurethan  
7 % Elasthan  
0,1 % Polyethylene

# circaid® juxtafit® essentials Unterschenkel

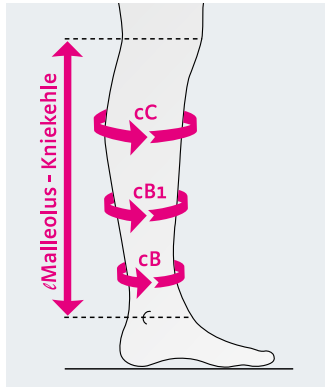

## Fußoption

Bei Bedarf kann eine zusätzliche Fußoption gesondert verordnet und bestellt werden.



## medi Tipp

Mit dem circaid juxtafit Maßband (Art.-Nr. 0097C67) einfach und schnell zur richtigen Produkt-Länge. Legen Sie hierfür die Markierung am Knöchel oder im Schritt an und halten das Maßband an das Bein Ihres Kunden. Sie können direkt ablesen, welche Produkt-Länge notwendig ist.

## Umfangmaße in cm

	S	M	M – X*	L
cC	30 – 38	36 – 43	43 – 50	41 – 48
cB1	20 – 28	25 – 33	33 – 40	30 – 38
cB	15 – 23	20 – 28	20 – 28	25 – 33
	L – X*	XL	XL – X*	XXL
cC	48 – 56	41 – 51	51 – 61	53 – 64
cB1	38 – 46	33 – 41	41 – 51	43 – 53
cB	25 – 33	30 – 38	30 – 38	33 – 41

## Maße für die Längenbestimmung

	Kurz	Lang
∓ Malleolus – Kniekehle	< 36	> 36


Größe / Art.-Nr.	Kurz	Lang
S	JU25702000	JU25002000
M	JU25703000	JU25003000
M – X*	JU25713000	JU25013000
L	JU25704000	JU25004000
L – X*	JU25714000	JU25014000
XL	JU25705000	JU25005000
XL – X*	JU25715000	JU25015000
XXL	JU25706000	JU25006000

\* – X = extraweite Wade

## Hinweis

Sollten die Maße des Patienten nicht in die Werte der Maßtabelle fallen, ist eine Versorgung mit circaid juxtafit essentials Bein nicht möglich.

# circaid® juxtafit® essentials Oberschenkel mit Knie

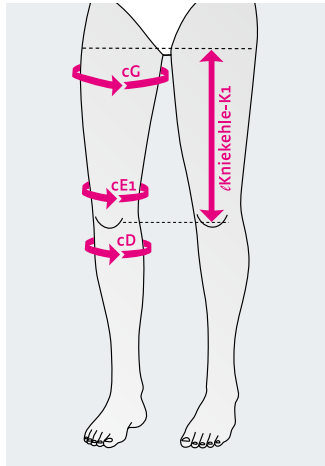

Umfangmaße in cm						
	XXS	XS	S	M	L	XL
cG	40 – 52	46 – 62	54 – 70	60 – 80	69 – 90	77 – 101
cE1*	32 – 42	37 – 48	42 – 55	50 – 65	58 – 76	66 – 87
cD	23 – 30	27 – 35	31 – 41	35 – 46	40 – 52	44 – 58


Maße für die Längenbestimmung			
	Extrakurz	Kurz	Lang
∅Kniekehle – K1	< 25	25 – 35	> 35

Produkt-Länge kann am oberen Rand um 5 cm gekürzt werden.

\* cE1 ist 5 cm oberhalb der Patella

Größe / Art.-Nr.	Extrakurz	Kurz	Lang	
Links	XXS	JU2878X000	JU2873X000	JU2803X000
	XS	JU28781000	JU28731000	JU28031000
	S	JU28782000	JU28732000	JU28032000
	M	JU28783000	JU28733000	JU28033000
	L	JU28784000	JU28734000	JU28034000
Rechts	XXS	JU2879X 000	JU2874X000	JU2804X000
	XS	JU28791000	JU28741000	JU28041000
	S	JU28792000	JU28742000	JU28042000
	M	JU28793000	JU28743000	JU28043000
	L	JU28794000	JU28744000	JU28044000
XL	JU28795000	JU28745000	JU28045000	

Bei circaid juxtafit essentials Oberschenkel mit Knie liegt eine Universal-Druckmesskarte bei. Bitte wählen Sie die Kante der Karte aus, die dem Knöchelumfang entspricht. Die Karten für circaid juxtafit Bein können sowohl für die Unterschenkel- als auch für die Oberschenkelversorgung genutzt werden.

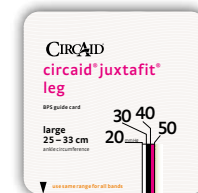

Druckmesskarte mit Größenzuordnung



Universal-Druckmesskarte

# circaid® juxtafit® Fußoption


Zur Entstauung  
lymphologischer Ödeme

Die folgende Fußoption wird für das Tragen in Kombination mit circaid juxtafit empfohlen – bei stark ausgeprägten Ödemen im Fußbereich.

## circaid® juxtafit® premium interlocking Fußteil

Zusätzliche Kompressionsversorgung für den Fuß mit einstellbarer Fußlänge.

- Kompression für Fuß und Sprunggelenk
- Ineinandergreifendes Fersenband – für eine Anpassung der Fußlänge
- Hochwertige Klettverschlüsse mit aufgenähten Gegenklett
- Fersenband für gezielte Kompression in der Region zwischen Achillessehne, Fersenbein und Fußknöchel (Bisgaard'sche Kullisse)
- Einfache Handhabung – ideal für Selbstmanagement
- Kann über der kompressiven Socke getragen werden

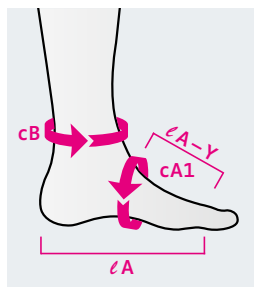

Umfang in cm	S	M	L
cA-Y	> 9	> 9	> 9
cB	< 36	< 36	< 41
cA1	19 – 24	24 – 29	29 – 34
cA	13 – 25	13 – 25	13 – 25
Art.-Nr.	JU3I002000	JU3I003000	JU3I004000

Hilfsmittelnummer:  
17.06.23.3003

### Hinweis

Es wird empfohlen, eine circaid Fußoption immer in Kombination mit einer circaid Beinversorgung zu tragen.

Indikationen: siehe Gebrauchsanweisung circaid juxtafit premium interlocking Fußteil



### Materialzusammensetzung

49 % Nylon  
46 % Polyurethan  
5 % Elasthan

### Videos

Mehr Informationen und Anlegevideos finden Sie unter:





# Wichtige Hinweise zu Rezept und Abrechnung

**Rezeptbeispiel**

Krankenkasse bzw. Kostenträger: [ ]

Name, Vorname des Versicherten: [ ] geb. am: [ ]

Kassen-Nr.: [ ] Versicherten-Nr.: [ ] Status: [ ]

Vertragsarzt-Nr.: [ ] VK gültig bis: [ ] Datum: [ ]

Hilfsmittel-Nr.: 6 **7** 8 9

Zusatzung: [ ] Gesamt-Brutto: [ ]

Arzneimittel-Nr./Brutto: [ ] Faktor: [ ] Taxe: [ ]

**Rp.** (Bitte Leerräume durchstreichen)

**1** Entstauung Lymphödem

**2** Medizinisches adaptives Kompressionssystem, circaid juxtafit essentials Unterschenkel

**3** 1 Stück

**4** 30 – 40 mmHg

**5** 17.06.23.2002

Vertragsarztstempel: [ ]

- 1 Markieren Sie das Feld Nr. 7 mit der Ziffer „7“
- 2 Genaue Indikation / Diagnose (ICD-10-Code), individuelle Kontextfaktoren
- 3 Ggf. Produkt-Name (mit Begründung)
- 4 Anzahl der Versorgungen (1 Stück oder 2 Stück)
- 5 Erforderlicher Kompressionsdruck (z. B. 30 – 40 mmHg)
- 6 Hilfsmittelnummer

## medi Tipp

Begründen Sie die Erforderlichkeit der MAK auf dem Rezept, um Kostenträgern die Bearbeitung zu erleichtern – zum Beispiel:

- Erneute Entstauung erforderlich, da Umfangmaße verändert

## circaid juxtafit essentials ist im Hilfsmittelverzeichnis für folgende Indikation gelistet:

- Initiale Entstauung von Lymphödemen

### Hinweis

Wenn sich das Beschwerdebild des Patienten im Verlauf verbessert, zum Beispiel Lymphödem in der **Erhaltungsphase**, ist es möglich die Versorgung zu wechseln und budgetneutral zum Beispiel einen flachgestrickten medizinischen Kompressionsstrumpf zu verordnen.

# circaid® juxtafit® essentials Arm

Zur Entstauung  
lymphologischer Ödeme

Medizinisches adaptives Kompressionssystem für die initiale Entstauung von Lymphödemen.

**Aufgrund der Produkt-Eigenschaften empfehlen wir circaid juxtafit essentials für:\***

- Männer / Frauen
- Initiale Entstauung von Lymphödemen
- Bis zu 24-stündige Kompressionstherapie

## Eigenschaften


- Mit handlicher Messkarte zuverlässig einstellbarer und kontrollierbarer Kompressionsdruck
- Nachjustieren der Bänder während des Tragens erhält den Kompressionsdruck kontinuierlich aufrecht<sup>1</sup>
- 6 – 8 Bänder – für eine individuelle anatomische Passform bei von Lymphödem betroffenen Extremitäten
- Produkt-Design gewährleistet nach proximal abfallenden Druckverlauf
- Abnehmbares Ellenbogenband für mehr Bewegungsfreiheit

## Nutzen für Ihre Kunden / Patienten

- Signifikant schnellere Entstauung von Lymphödemen<sup>5</sup>
- Eigenständiges und einfaches An- und Ablegen der Versorgung mit Klett – für mehr Selbstmanagement
- Erleichtert Hygiene und Hautpflege im Therapiealltag
- Angenehm auf der Haut: atmungsaktiv
- Optimaler Sitz durch ineinandergreifende Bänder
- Geeignet für Waschmaschine und Trockner

Hilfsmittelnummer:  
17.10.10.0001

\* Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die Diagnose des Arztes noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.  
Indikationen: siehe Gebrauchsanweisung circaid juxtafit essentials

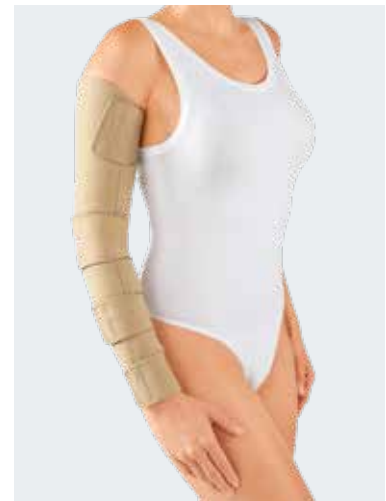

## Einstellbarer Kompressionsdruck

10 – 20 mmHg  
20 – 30 mmHg  
30 – 40 mmHg

## Farbe

Beige

## Hinweis

circaid juxtafit essentials Arm ist im Hilfsmittelverzeichnis für folgende Indikation gelistet:  
• Initiale Entstauung von Lymphödemen

## Materialzusammensetzung


53 % Nylon  
40 % Polyurethan  
7 % Elasthan

## Videos

Mehr Informationen und Anlegevideos finden Sie unter:



# circaid® juxtafit® essentials Arm

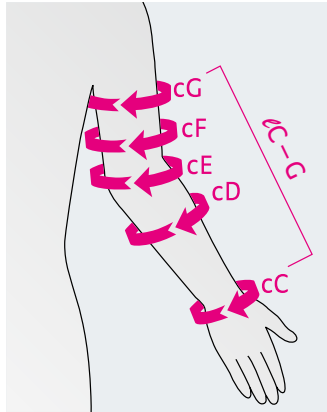

## Handoption

Eine Kompressionsversorgung für die Hand muss separat verordnet und bestellt werden.

## Umfangmaße in cm

	1	2	3	4	5	6
cG	28 – 32	30 – 34	32 – 37	35 – 40	38 – 44	42 – 48
cF	26 – 30	28 – 32	30 – 35	33 – 38	36 – 41	39 – 45
cE	25 – 28	27 – 30	29 – 32	31 – 34	33 – 36	36 – 40
cD	23 – 26	25 – 28	27 – 30	29 – 32	31 – 34	33 – 37
cC	15 – 17	17 – 19	19 – 21	21 – 23	23 – 25	25 – 28

## Maße für die Längenbestimmung

	Extrakurz	Kurz	Lang
∠ C – G	< 38	38 – 48	> 48

Größe / Art.-Nr.		Extrakurz	Kurz	Lang
Links	1	JU2A781000	JU2A731000	JU2A031000
	2	JU2A782000	JU2A732000	JU2A032000
	3	JU2A783000	JU2A733000	JU2A033000
	4	JU2A784000	JU2A734000	JU2A034000
	5	JU2A785000	JU2A735000	JU2A035000
	6	JU2A786000	JU2A736000	JU2A036000
Rechts	1	JU2A791000	JU2A741000	JU2A041000
	2	JU2A792000	JU2A742000	JU2A042000
	3	JU2A793000	JU2A743000	JU2A043000
	4	JU2A794000	JU2A744000	JU2A044000
	5	JU2A795000	JU2A745000	JU2A045000
	6	JU2A796000	JU2A746000	JU2A046000

## Lieferumfang:

- 1 Stück medizinisches adaptives Kompressionssystem
- 1 Stück Druckmesskarte
- 1 Stück Ellenbogenband
- 1 Stück circaid Überzug Schwarz

## Hinweis

Sollten die Maße des Patienten nicht in die Werte der Maßtabelle fallen, ist eine Versorgung mit circaid juxtafit essentials Arm nicht möglich.

# circaid® juxtafit® Handoption


Zur Entstauung  
lymphologischer Ödeme

Die folgende Handoption wird für das Tragen in Kombination mit circaid juxtafit empfohlen.

## circaid® juxtafit® essentials Handteil

Zusätzliche Kompressionsversorgung für die Hand.

- Kompression für die Hand – vom Handgelenk bis zu den Fingergrundgelenken
- Einstellbar für einen erhöhten Druck auf den Handrücken
- Einfache Handhabung – ideal für Selbstmanagement
- In Standardgrößen erhältlich – für die linke oder die rechte Hand

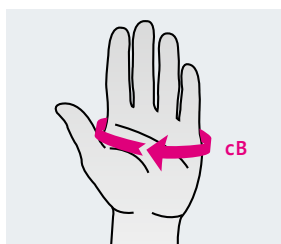

	Umfang in cm / cB	Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts
XS	14 – 17	JU2B031000	JU2B041000
S	17 – 20	JU2B032000	JU2B042000
M	20 – 23	JU2B033000	JU2B043000
L	23 – 26	JU2B034000	JU2B044000
XL	26 – 29	JU2B035000	JU2B045000

Hilfsmittelnummer:  
17.10.10.1001

### Hinweis

Es wird empfohlen, eine circaid Handoption immer in Kombination mit einer circaid Armversorgung zu tragen.

Indikationen: siehe Gebrauchsanweisung circaid juxtafit essentials Handteil



### Materialzusammensetzung

53 % Nylon  
39,5 % Polyurethan  
7 % Elasthan  
0,5 % andere Fasern

### Videos

Mehr Informationen und Anlegevideos finden Sie unter:



# Wichtige Hinweise zu Rezept und Abrechnung

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kassen-Nr. Versicherten-Nr. Status

Vertragsarzt-Nr. VK gültig bis Datum

Hilfsmittel-Nr. Indikation Spr.-Gr. Eingr.-Platz Apotheken-Nummer / IK

Zuzahlung Gesamt-Stück

Arzneimittel-Abrechnung Faktor Taxe

Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)

2 Entstauung Lymphödem

3 Medizinisches adaptives Kompressionssystem, circaid juxtafit essentials Arm

4 1 Stück

5 20 – 30 mmHg

6 17.10.10.0001

- 1 Markieren Sie das Feld Nr. 7 mit der Ziffer „7“
- 2 Genaue Indikation / Diagnose (ICD-10-Code), individuelle Kontextfaktoren
- 3 Ggf. Produkt-Name (mit Begründung)
- 4 Anzahl der Versorgungen (1 Stück oder 2 Stück)
- 5 Erforderlicher Kompressionsdruck (z. B. 20 – 30 mmHg)
- 6 Hilfsmittelnummer

## circaid juxtafit essentials ist im Hilfsmittelverzeichnis für folgende Indikation gelistet:

- Initiale Entstauung von Lymphödemen

### Hinweis

Wenn sich das Beschwerdebild des Patienten im Verlauf verbessert, zum Beispiel Lymphödem in der **Erhaltungsphase**, ist es möglich die Versorgung zu wechseln und budgetneutral zum Beispiel einen flachgestrickten medizinischen Kompressionsstrumpf zu verordnen.

# circaid® Zubehör

Selbstzahlerleistung

## circaid® Unterziehstrümpfe

### Zusätzlicher Tragekomfort

- Leichtes Anziehen
- Aus Baumwolle – hoher Tragekomfort und Aufrechterhaltung der Hygiene
- Eine Größe für alle Umfänge und Längen, da dehnbar in Breite und Länge
- Ohne therapeutische Kompression
- Erhältlich für Arm und Bein



Verfügbar in den Längen Unterschenkel (mit offenem oder geschlossenem Fuß) oder ganzes Bein, sowie zusätzlich in der Ausführung Silber für den Unterschenkel.

## circaid® Überzug

### Glatter Überstrumpf für circaid Produkte

- Kann über circaid Versorgungen getragen werden
- Verhindert unerwünschtes Festkletten der Kompressionsversorgung in der Kleidung
- Verleiht der Kompressionsversorgung ein edles Aussehen
- Erhältlich in den Farben Schwarz und Beige
- Ohne therapeutische Kompression



Verfügbar in der Länge Unterschenkel.

# medi Hautpflege

Selbstzahlerleistung

## Wohlfühlpflege für die Haut

Die Hautpflege-Produkte von medi sind wahre Streicheleinheiten für die Sinne.

### Pflege in der Ödemtherapie – ein wichtiger Baustein

Da Ödempatienten häufig empfindliche Haut haben, hat medi eine eigene Pflege-Serie entwickelt. Damit ist es ganz einfach, den „Schutzschild Haut“ zu erhalten.

Die wertvollen Inhaltsstoffe sind exakt auf die Bedürfnisse von Menschen, die Kompressionsversorgungen tragen, abgestimmt und sorgen für ein wohltuendes Pflege-Erlebnis.

#### medi Tipp

medi Pflege-Produkte sind Kosmetikprodukte und dürfen nur auf intakter Haut angewendet werden.



### medi day®

#### Kühlende Hautpflege mit Rosskastanie

- Erfrischende und kühlende Wirkung
- Reduziert das Spannungsgefühl

### medi night

#### Hautpflege mit regenerierender Hamamelis

- Für wohltuende Erholung in der Nacht
- Beruhigt die Haut und unterstützt zusätzlich die Regeneration

### medi soft

#### Hautpflege mit Rosskastanie und feuchtigkeitsspendender Urea

- Sanfter Cremeschaum zur Hautpflege rund um die Uhr
- Gepflegte, geschmeidige Haut

### medi fresh

#### Erfrischendes Spray mit Menthol

- Der Frische-Kick für zwischendurch
- Unmittelbar spürbare Erfrischung

# Ihr elektronischer Weg zu medi beginnt hier

Ausführliche Informationen finden Sie unter [www.medi.de/medigital](http://www.medi.de/medigital) oder direkt über den jeweiligen QR-Code beziehungsweise die Short-URL.

## medi e-shop

Mit dem medi e-shop sind Sie überall flexibel, an Ihrem Arbeitsplatz oder unterwegs per Tablet. Rund um die Uhr. Einfach und mobil.

Der medi e-shop bietet Ihnen Unterstützung bei der Produkt-Auswahl und -Zusammenstellung. Auch können Sie Kostenvoranschläge ohne Eingabe der Patientenmaße online generieren und Ihre Bestellungen bei medi effizient tätigen und verwalten.



## Newsletter

Immer auf dem Laufenden – mit den medi Newslettern. Wertvolle Infos für Ihren Arbeitsalltag: schnell, einfach und nachhaltig.

### medi for you

- Für Führungs- und Fachkräfte im Sanitätsfachhandel
- Das erwartet Sie: Fach-Interviews, Gesundheitswissen, Produkt-Neuigkeiten aus den Bereichen Kompression, Orthopädie und Footcare sowie Branchen-News
- Sechsmal jährlich
- **Kostenlose Anmeldung:** [www.medi.biz/mfy](http://www.medi.biz/mfy)



### medi Lymph-News

- Für alle, die Lymphpatienten versorgen und fachlich begleiten
- Das erwartet Sie: Experten-Interviews und Gast-Beiträge von Lymphspezialisten, Produkt-Neuigkeiten und Versorgungskonzepte sowie aktuelle Informationen aus der Gesundheitspolitik
- Viermal jährlich
- **Kostenlose Anmeldung:** [www.medi.biz/lymph-news](http://www.medi.biz/lymph-news)





# Das medi Kundencenter – medi Hotline

Unser medi Kundencenter ist gerne für Sie da.

---



Hotline +49 921 912-950

Fax +49 921 912-955

Oder per E-Mail: [auftragsservice@medi.de](mailto:auftragsservice@medi.de)

## Quellen

- <sup>1</sup> Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: [www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/037-005.html](http://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/037-005.html) (Letzter Zugriff 17.10.2023).
- <sup>2</sup> Rabe E et al. Venenerkrankungen der Beine. Gesundheitsberichterstattung des Bundes. 2009 (44)
- <sup>3</sup> Mosti G et al. Adjustable velcro compression devices are more effective than inelastic bandages in reducing venous edema in the initial treatment phase: a randomized controlled trial. Eur J Vasc Endovasc Surg 2015;50:368-374.
- <sup>4</sup> Protz K et al. Kompressionsmittel für die Entstaunungstherapie. Vergleichende Erhebung im Querschnitt zu Handhabung, Anpressdruck und Tragegefühl. Hautarzt 2018;69(3):232-241.
- <sup>5</sup> Damstra R et al. Prospective, randomized, controlled trial comparing the effectiveness of adjustable compression Velcro wraps versus inelastic multicomponent compression bandages in the initial treatment of leg lymphedema. J Vasc Surg: Ven and Lym Dis 2013;1(1):13-19.

## Zweckbestimmungen

circaid Beinversorgung: Die Kompressionsversorgung dient bei Patienten mit Venen- und Lympherkkrankungen zur Kompression des Beins.  
circaid Armversorgung: Die Kompressionsversorgung dient bei Patienten mit Venen- und Lympherkkrankungen zur Kompression des Arms.  
circaid Fußoptionen: Die Kompressionsversorgung dient bei Patienten mit Venen- und Lympherkkrankungen zur Kompression des Fußes und des Knöchels.  
circaid Handoption: Die Kompressionsversorgung dient bei Patienten mit Venen- und Lympherkkrankungen zur Kompression der Hand.  
mediven ulcer kit: Rundgestricktes Kompressionsstrumpfsystem zur Kompression der unteren Extremitäten, hauptsächlich zur Behandlung von Erkrankungen des Venensystems.  
mediven Kompressionsstrümpfe: Rund- oder flachgestrickte/r medizinische/r Kompressionsstrumpf/-versorgung zur Kompression der unteren Extremitäten, hauptsächlich bei der Behandlung von Erkrankungen des Venen- oder Lymphgefäßsystems.



# Bestellformular

circaid® – das Original in der adaptiven Kompression



medi Kundennummer

Versandanschrift

Name Fachhandel

Ansprechpartner Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

**medi GmbH & Co. KG**  
Medicusstraße 1  
95448 Bayreuth  
Germany  
T +49 921 912-950  
F +49 921 912-955  
auftragsservice@medi.de  
www.medi.biz/circaid

**CIR**

## Arbeitsmaterialien für Sie



Bestellblock  
circaid  
Art.-Nr. 0050549

Anzahl: \_\_\_\_\_



Anziehposter  
circaid juxtafit Bein  
Art.-Nr. 0050541

Anzahl: \_\_\_\_\_



Phleboguide  
Art.-Nr. 0020539

Anzahl: \_\_\_\_\_



Maßband  
circaid juxtalite  
(5er-VE)  
Art.-Nr. 0097C78

Anzahl: \_\_\_\_\_



Endverbraucher-  
Broschüre circaid  
(25er-VE)  
Art.-Nr. 0050550

Anzahl: \_\_\_\_\_



Lymphguide  
Art.-Nr. 0025134

Anzahl: \_\_\_\_\_



Anziehposter  
circaid juxtalite  
Art.-Nr. 0050540

Anzahl: \_\_\_\_\_



Arzt-Flyer  
circaid  
Art.-Nr. 0050543

Anzahl: \_\_\_\_\_



Broschüre  
circaid  
Art.-Nr. 0050551

Anzahl: \_\_\_\_\_



Maßband  
circaid juxtafit  
(5er-VE)  
Art.-Nr. 0097C67

Anzahl: \_\_\_\_\_

**Datenschutz:** Wir, die medi GmbH & Co. KG, verarbeiten Ihre Daten zweckgebunden zur Bestellabwicklung und zur Kundenbetreuung (Rechtsgrundlage: DSGVO, Art. 6, Abs. 1b Vertrag). Empfänger Ihrer Daten sind ggf., jedoch nur anlassbezogen, Dienstleister für Versanddienste. Weitere Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Betroffenenrechten, der Beschwerdestelle und die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten erhalten Sie unter: [www.medi.de/datenschutzhinweise](http://www.medi.de/datenschutzhinweise) oder auf Anfrage auf anderem Wege.

**medi. ich fühl mich besser.**

medi GmbH & Co. KG  
Medicusstraße 1  
95448 Bayreuth  
Germany  
T +49 921 912-950  
F +49 921 912-955  
auftragsservice@medi.de  
www.medi.biz/circaid



0050551/02.2024